

Extractor™ Pro RX

エクストラクタープロ RX リトリバルバルーン

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



A difference you can feel™.

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

消化器内視鏡領域では、内視鏡像の視野だけでなく術者の触感によるアプローチも重要視されています。RX Biliary Systemを構成する製品群は、製品のレスポンスで実感できる優れたアクセス性とコントロール性を提供すべく改良されてきました。まさに、術者がその違いを体感できるシステムです。

長年にわたり、ボストン・サイエンティフィックはRX Biliary Systemを日常的に使用する世界中の医療従事者から信頼とご愛顧をいただいています。RX Biliary Systemはその優れたパフォーマンスにより胆膵処置の可能性を拡大することにも貢献してきました。術者のシングルオペレーションを想定した製品の技術革新が、繊細なコントロールとアクセスを可能にします。




Enhanced Balloon De

確実かつ効率的な胆石除去を可能にする独自の

スクエアショルダー形状

胆管壁へ接する面積が広く、細かい結石や胆泥の除去効率を向上させます。

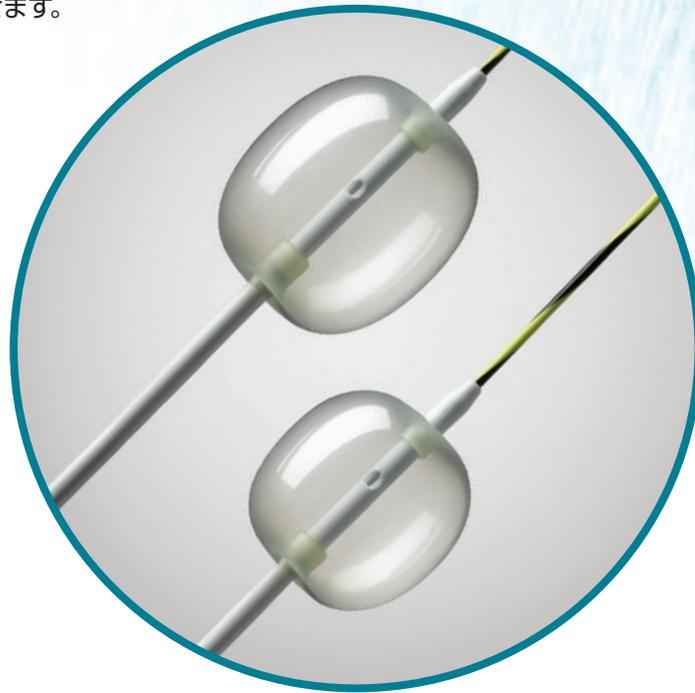

弾力性に富んだバルーン設計

最大径まで拡張した状態でも柔軟性があり、多様な胆管径にフレキシブルに対応します*。

*バルーンサイズの拡張範囲は9-12mm, 12-15mm, 15-18mmの3種類からお選びいただけます。



←弾力性に富んでいるため、胆管径に密着して採石します。

写真提供：公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
消化器病センター 杉森 一哉 先生

耐久性に優れた肉厚構造

バルーンの厚みを約50%*UPし、シャフトに対する接着強度を60%程度*向上させました。複数回の採石に対応する耐久性を備えています。

*自社従来品比

sign

のバルーンデザイン



Procedural Efficiency and Control

手技効率を向上させる、コントロール性の高いカテーテルシャフト



RX Biliary System™ 対応

- Short Wire 法の手技を可能にする RX Biliary System™ に対応。一連の胆膵内視鏡治療を効率良く行えます。
- ガイドワイヤを固定する Locking Device を着用することで、ガイドワイヤの抜けに気をとられることなくカテーテルを大きなストロークで操作できます。




双方向からガイドワイヤ挿入が可能なサイドポート

- 先端から45cmにあるサイドポートから、最短で先端から4cmまでカテーテルとガイドワイヤのセパレートが可能。術者が手元でカテーテルとガイドワイヤ両方を操作することが可能です。

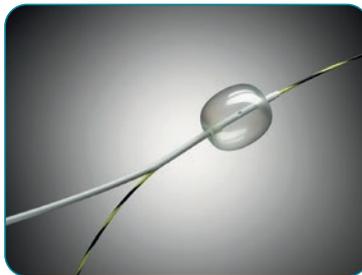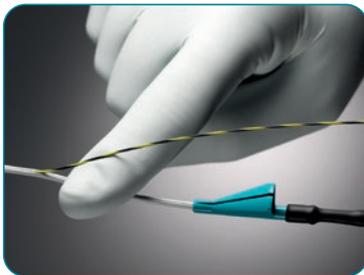

- 一度ガイドワイヤをカテーテルから抜去した後でも、カテーテル後端のポートから再挿入してガイドワイヤ留置下の処置へ速やかに移行できます。

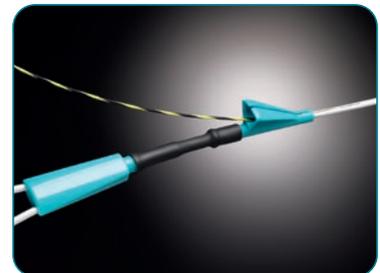


柔軟性とコシを両立させたテーパードシャフト

- カテーテルシャフトはコシとガイドワイヤ追従性を両立させるテーパードデザインを採用。胆管上部や乳頭直下では適度なプッシュビリティを発揮し、先端部は高いコントロール性と胆管内での柔軟性を提供することで、効率的かつ安全な手技に貢献します。

Extractor™ Pro RX

エクストラクタープロ RX リトリールバルーン

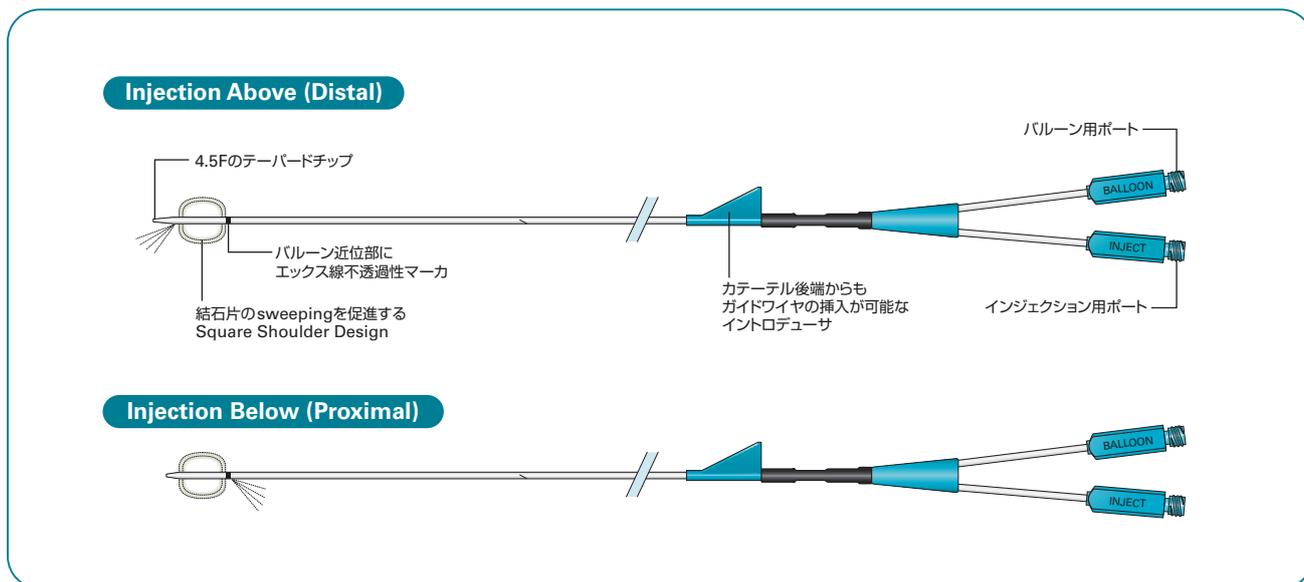

エクストラクタープロ RX リトリールバルーン (Injection Above)

カタログ番号	バルーン外径 (mm)	カテーテル			適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inch)
		外径 (Fr)	先端部外径 (Fr)	有効長 (cm)		
4700	9.0-12.0	7-6	4.5	200	3.2	0.035
4701	12.0-15.0	7-6	4.5	200	3.2	0.035
4702	15.0-18.0	7-6	4.5	200	3.2	0.035

販売名：エクストラクター PRO リトリールバルーン
医療機器認証番号：223ABBZX00018000

エクストラクタープロ RX リトリールバルーン (Injection Below)

カタログ番号	バルーン外径 (mm)	カテーテル			適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inch)
		外径 (Fr)	先端部外径 (Fr)	有効長 (cm)		
4703	9.0-12.0	7-6	4.5	200	3.2	0.035
4704	12.0-15.0	7-6	4.5	200	3.2	0.035
4705	15.0-18.0	7-6	4.5	200	3.2	0.035

販売名：エクストラクター PRO リトリールバルーン
医療機器認証番号：223ABBZX00018000

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

Boston Scientific
Advancing science for life™

製品の詳細については添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1602-31209-B・2 / PSST20160212-0158