


HANAROSTENT® Esophageal Proximal Release

正確な位置決めを
サポートする
プロキシマルリリース

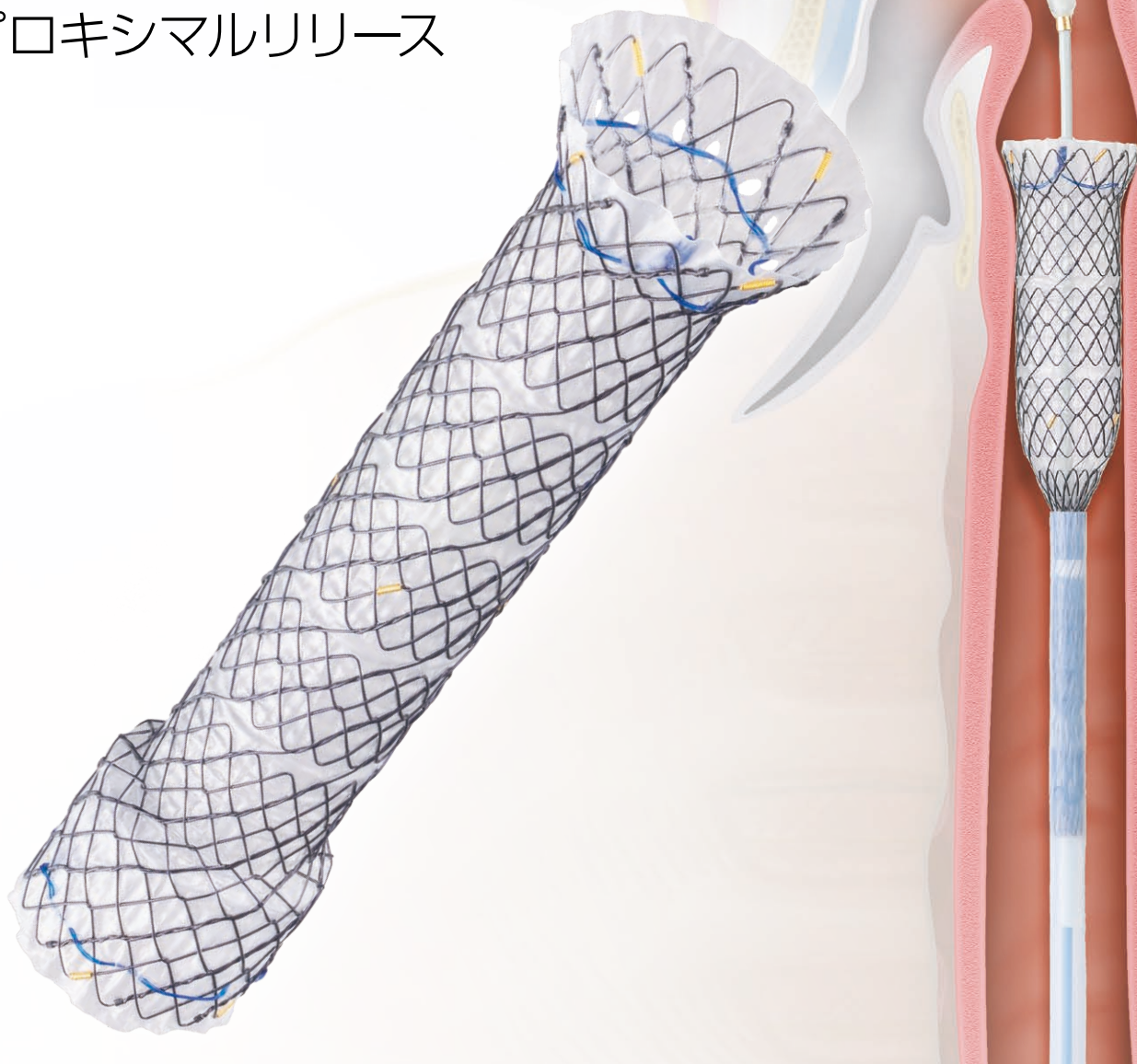

HANAROSTENT[®] Esophageal Proximal Release

臨床での豊富な実績を誇る HANAROSTENT に、
的確な位置決めをサポートする
プロキシマルリリースタイプが登場

口側から展開が始まるプロキシマルリリースが 的確な位置決めをサポートします

独自のプロキシマルリリースタイプのデリバリーシステムを採用。
ステントリリースの際、口側から留置を開始することで、
咽頭部との距離を確認しながら正確なステントの位置決めをサポートします。


MigrationとAxial Forceの抑制を期待した ステントボディ部の溝加工

ステントボディ部に施された溝加工がステントの
柔軟性を高め、屈曲部への追従性向上が期待できます。
また狭窄組織が溝加工に入り込むことにより、
ステントのMigration抑制効果が期待できます。




食道上部を刺激しにくい、 口側8mmショートフレア形状

通常フレア（長さ20mm）より大幅に短い
8mmショートフレアを口側に採用。
食道上部への正確な留置をサポートしながら、
オーバーサイズカバーの効果とともに
咽頭部への刺激低減を目指します。

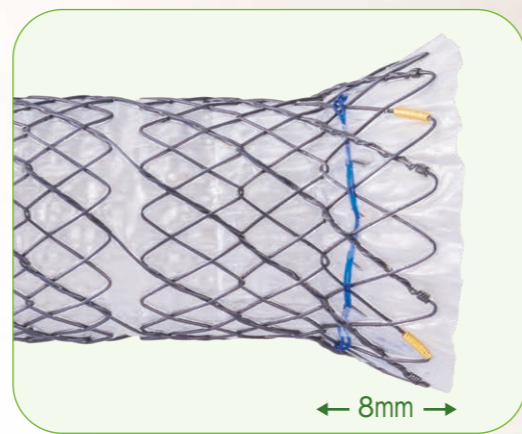


口側から展開が始まる プロキシマルリリース


1. デリバリーシステムを固定し、シャフトを
押し込むことでステントリリースが始まります。

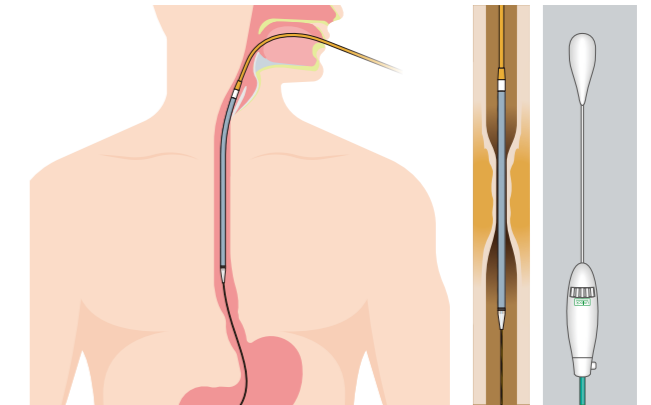


2. シャフトを押し込むと、
ステントの口側から展開されます。

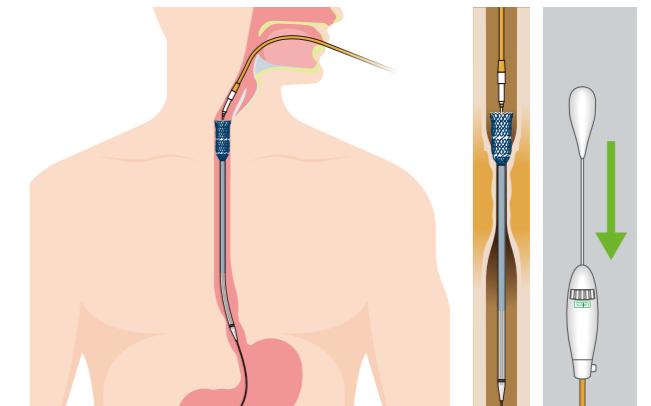


3. 咽頭部との距離を確認しながら
留置が可能です。

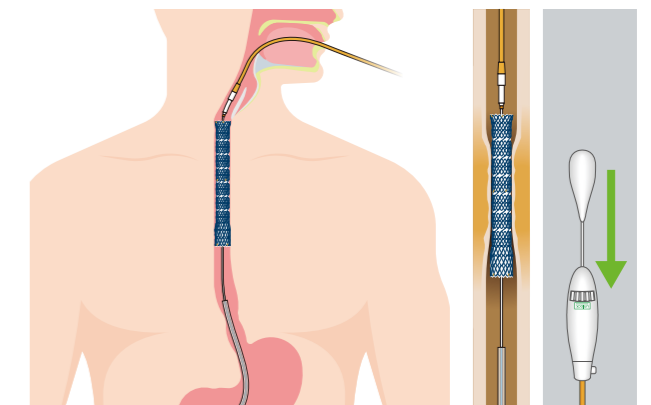

HANAROSTENT[®] Esophageal Proximal Release

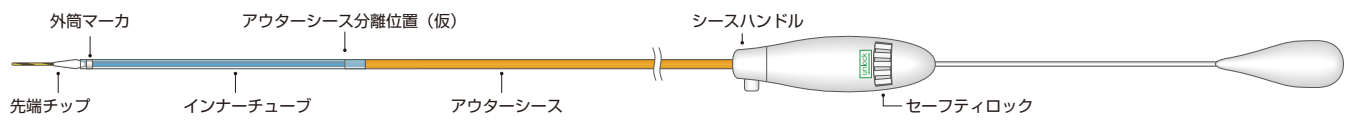

カタログ番号	ステント			カテーテル		ガイドワイヤ (inches)
	外径 (mm)	フレア部外径 (mm)	全長 (cm)	外径 (mm)	有効長 (cm)	
M00503670	18	24	6	6	70	0.038
M00503690	18	24	8	6	70	0.038
M00503710	18	24	10	6	70	0.038

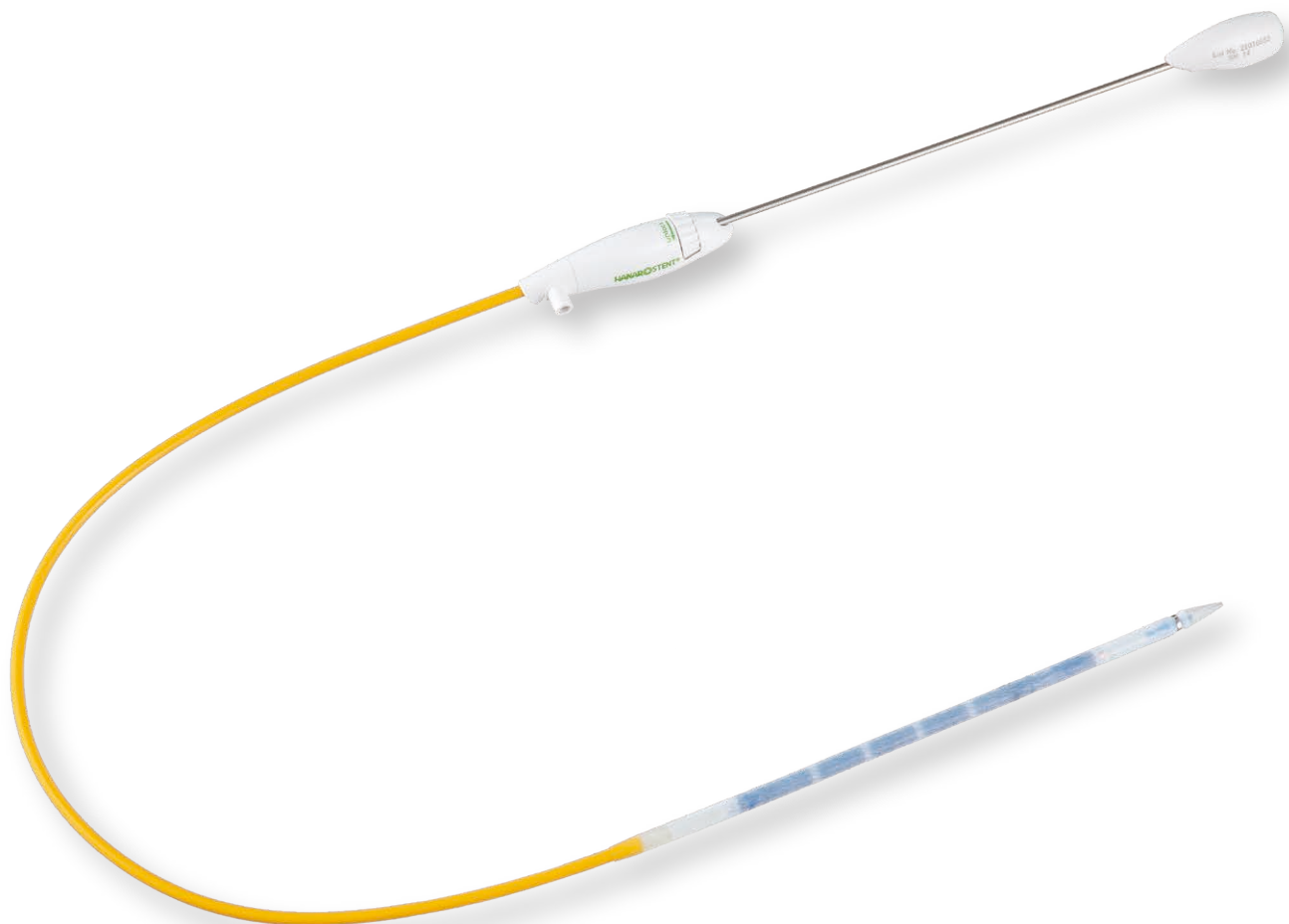

径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT 食道用カバー Proximal Release
 医療機器承認番号：30200BZ100037000
 外国特例承認取得者：M.I.TechCo.,Ltd.
 選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
 ©2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
 All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
 Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
 本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1138903-AA