

MIC-KEY バルーンボタン ENFit

バルーン・ボタン型 交換用胃瘻チューブ

ENFit®
ISO80369-3

ISO 80369-3
スモールポアコネクタ 適応製品



MIC-KEY バルーンボタン ENFit

バルーン・ボタン型 交換用胃瘻チューブ

バルーン

- ガイドワイヤ使用でスムーズな交換が可能
- チューブ先端テーパで挿入性向上

サイズ


- チューブ外径・シャフト長で豊富なサイズ選択肢

フィーディングポート(チューブ本体表露出部分)

- 繰り返される接続チューブ着脱に耐える構造体
- 逆流防止弁を内蔵

接続チューブ

- 新規格ENFitコネクタ(ISO 80369-3)タイプ
- MIC-KEY本体からの抜け防止のためのロック機構
- 栄養投与・減圧(ガス抜き)兼用

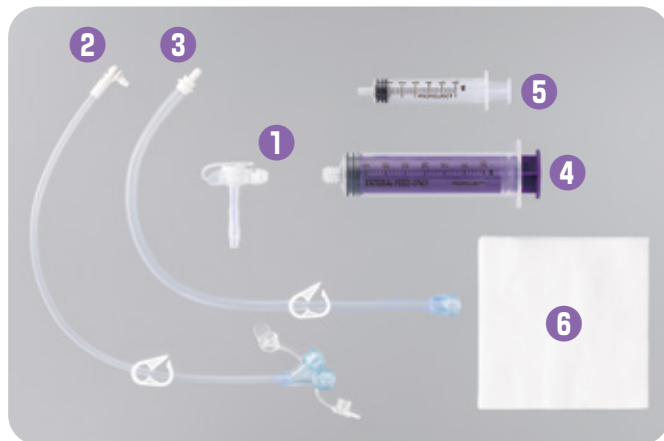


キット内容

- 1 栄養用チューブ本体(1本)
- 2 接続チューブ(直角接続・持続注入用) (30cm)(1本) **DEHP FREE**
- 3 接続チューブ(ストレート接続・ポーラス注入用) (30cm)(1本) **DEHP FREE**
- 4 35mL カテーテルチップシリンジ(1個)
- 5 6mL ルアーチップシリンジ(1個)
- 6 ガーゼ

* ガイドワイヤ 別箱入り(1本)
チューブ外径12Fの製品には附属されていません

接続チューブ着脱方法


- 1 栄養用チューブのフィーディングポートカバーを開く。
- 2 接続チューブのロックコネクタにある黒色ラインを栄養用チューブのフィーディングポートの黒色ラインに揃えて差し込む。
- 3 軽く手応えが感じられるまで接続部を(約3/4回転)時計方向に回して、ロックする。
- 4 接続チューブを取り外すには、接続チューブと栄養用チューブの黒色ラインが一致するところまでコネクタを反時計方向に回し、取り外し、栄養用チューブのフィーディングポートカバーを閉じる。

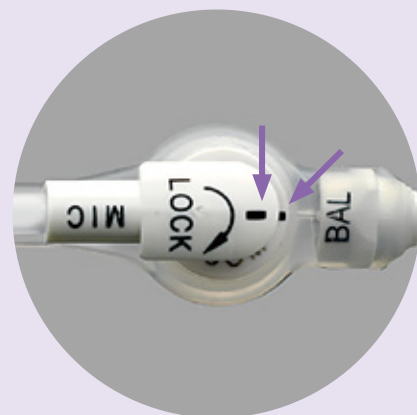

MIC-KEY バルーンボタン ENFit 規格

チューブ 外径 シャフト長	12F	12F バルーン充填容量		14F	16F	18F	20F	24F	14-24F バルーン充填容量	
		推奨	最大						推奨	最大
0.8cm	8140-12-0.8	3mL	5mL	8140-14-0.8	8140-16-0.8	8140-18-0.8	8140-20-0.8	—	5mL	10mL
1.0cm	8140-12-1.0	3mL	5mL	8140-14-1.0	8140-16-1.0	8140-18-1.0	8140-20-1.0	—	5mL	10mL
1.2cm	8140-12-1.2	3mL	5mL	8140-14-1.2	8140-16-1.2	8140-18-1.2	8140-20-1.2	—	5mL	10mL
1.5cm	8140-12-1.5	3mL	5mL	8140-14-1.5	8140-16-1.5	8140-18-1.5	8140-20-1.5	8140-24-1.5	5mL	10mL
1.7cm	8140-12-1.7	3mL	5mL	8140-14-1.7	8140-16-1.7	8140-18-1.7	8140-20-1.7	8140-24-1.7	5mL	10mL
2.0cm	8140-12-2.0	3mL	5mL	8140-14-2.0	8140-16-2.0	8140-18-2.0	8140-20-2.0	8140-24-2.0	5mL	10mL
2.3cm	8140-12-2.3	3mL	5mL	8140-14-2.3	8140-16-2.3	8140-18-2.3	8140-20-2.3	8140-24-2.3	5mL	10mL
2.5cm	8140-12-2.5	3mL	5mL	8140-14-2.5	8140-16-2.5	8140-18-2.5	8140-20-2.5	8140-24-2.5	5mL	10mL
2.7cm	8140-12-2.7	3mL	5mL	8140-14-2.7	8140-16-2.7	8140-18-2.7	8140-20-2.7	8140-24-2.7	5mL	10mL
3.0cm	8140-12-3.0	3mL	5mL	8140-14-3.0	8140-16-3.0	8140-18-3.0	8140-20-3.0	8140-24-3.0	5mL	10mL
3.5cm	8140-12-3.5	3mL	5mL	8140-14-3.5	8140-16-3.5	8140-18-3.5	8140-20-3.5	8140-24-3.5	5mL	10mL
4.0cm	8140-12-4.0	3mL	5mL	8140-14-4.0	8140-16-4.0	8140-18-4.0	8140-20-4.0	8140-24-4.0	5mL	10mL
4.5cm	—	—	—	8140-14-4.5	8140-16-4.5	8140-18-4.5	8140-20-4.5	8140-24-4.5	5mL	10mL

販売名：MIC* 栄養チューブ
 医療機器認証番号：226ADBZX00194000
 製造販売業者：アバノス・メディカル・ジャパン・インク

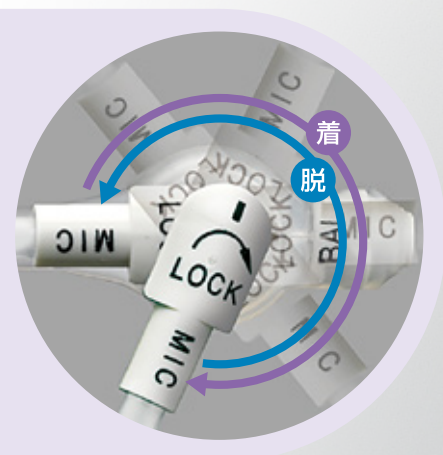

このマークのある製品は原材料にポリ塩化ビニールを使用していますが、
 DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を含まずDOA(アジピン酸ジオクチル)を使用しています。



MIC-KEY アクセサリー ENFit(別売品)



チューブ長30cm

直角接続・持続注入用

MIC直角接続チューブ ENFit **DEHP FREE**

カタログ番号	チューブ長	備考
0141-12	30cm	キット内容同等品
0141-24	60cm	

販売名：MIC* 附属チューブ
医療機器届出番号：14B1X10005000210
製造販売業者：アバノス・メディカル・ジャパン・インク



チューブ長30cm

ストレート接続・ボラス注入用

MICボラスストレート接続チューブ ENFit **DEHP FREE**

カタログ番号	チューブ長	備考
0143-12	30cm	キット内容同等品
0143-24	60cm	

販売名：MIC* 附属チューブ
医療機器届出番号：14B1X10005000210
製造販売業者：アバノス・メディカル・ジャパン・インク



チューブ長30cm

直角接続・ボラス注入用

MICボラス直角接続チューブ ENFit **DEHP FREE**

カタログ番号	チューブ長
0144-12	30cm
0144-24	60cm

販売名：MIC* 附属チューブ
医療機器届出番号：14B1X10005000210
製造販売業者：アバノス・メディカル・ジャパン・インク

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp