

WallFlex™ Duodenal Stent

ウォールフレックス 十二指腸用ステント

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



**Open to the
Possibilities™.**

WallFlex™ Stents Open to the Possibilities™


ボストンサイエンティフィックでは、医療の新たな可能性を追求することに情熱を注いできました。

WallFlexは、管腔の開存・柔軟性・コントロール性、そして患者ケアといった様々なニーズへ対応するようデザインされており、緩和治療ケアにおける選択肢を広げるために開発された、新しいプラットフォームです。

患者様の苦痛緩和を目的とした新しい治


WallFlex™ Duodenal

WallFlex Duodenal Stentは、悪性胃十二指腸閉塞に対する内視鏡用ステント。本邦で初めて薬事承認を取得した十二指腸用メタリックステントです。内視鏡的に低侵襲に留置できるため、患者様の苦痛緩和を目的とした新しい治療の選択肢を提供いたします。

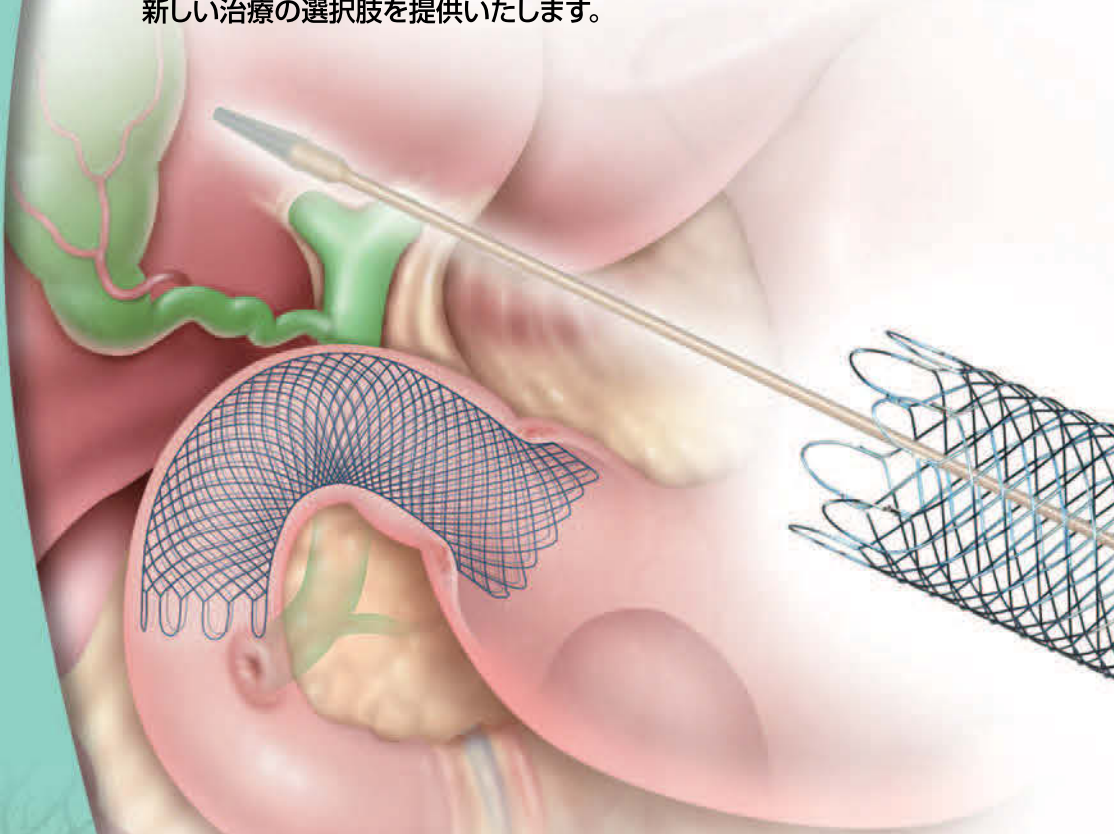

Flexible


- 柔軟なデリバリーシステムと先端テーパチップのコンビネーションにより、高度な狭窄症例においても確実にステントをデリバリーできます。
- 独自のステントメッシュデザインは、閉塞部位の十分な拡張能力と強い屈曲への追従性能をバランス良く発揮します。

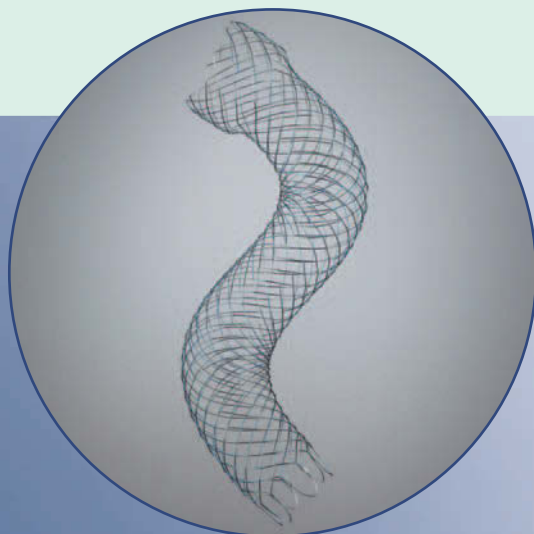

療の選択肢を提供する





Stent

として開発され、

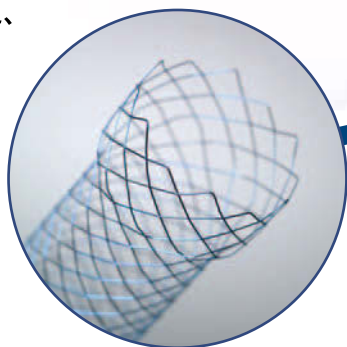

Control

- 10Fr (3.33mm) のロープロファイルな TTS (Through-The-Scope) デリバリーカテーテルは、優れたアクセス性と操作性を提供します。
- エックス線不透過性マーカとクリアーなトランジッションゾーンが、ステントのポジショニングと正確な留置をサポートします。
- デリバリーの再収納機能により、正確なステント留置が可能となります。
※約80%以内のステント展開であれば、2回まで再収納可能です。

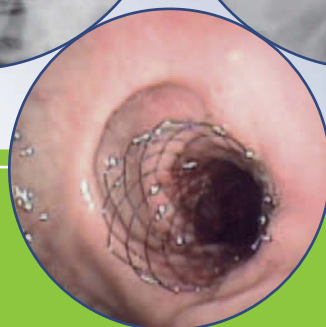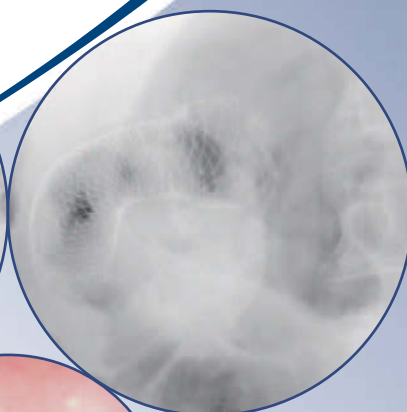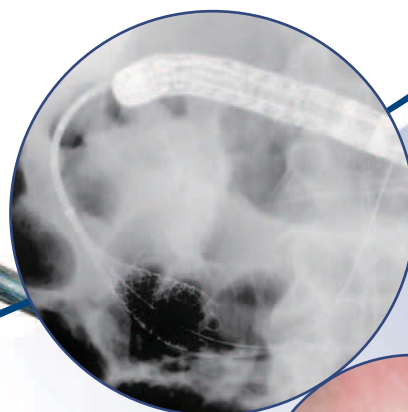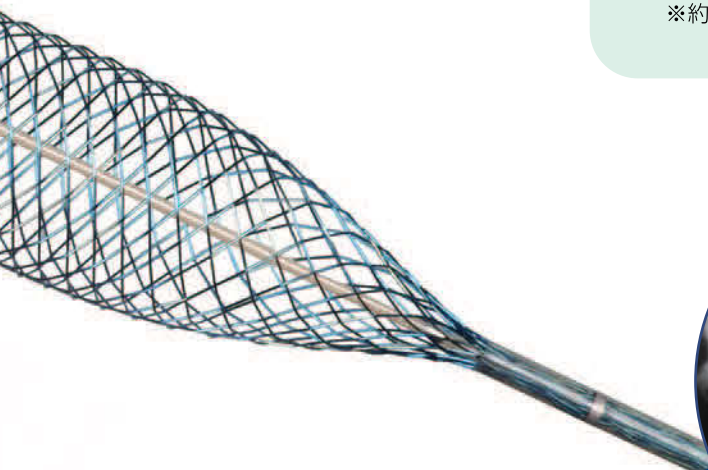


Technology

- ステントシステムの継続的な技術改良により、10Fr (3.33mm) の TTS デリバリーシステムに大口径のステントを装着することを可能にしました。
- ナイチノール素材のステントは、優れた radial force と柔軟性を提供します。
- フレア形状はステントの脱落を防ぎ、フードインパクションを低減するよう設計されています。

WallFlex™ Duodenal Stent

ウォールフレックス 十二指腸用ステント

*「展開後近位マーカ」は、ステントが展開したときのステントのプロキシマル端のおおよその位置を示す目安です。

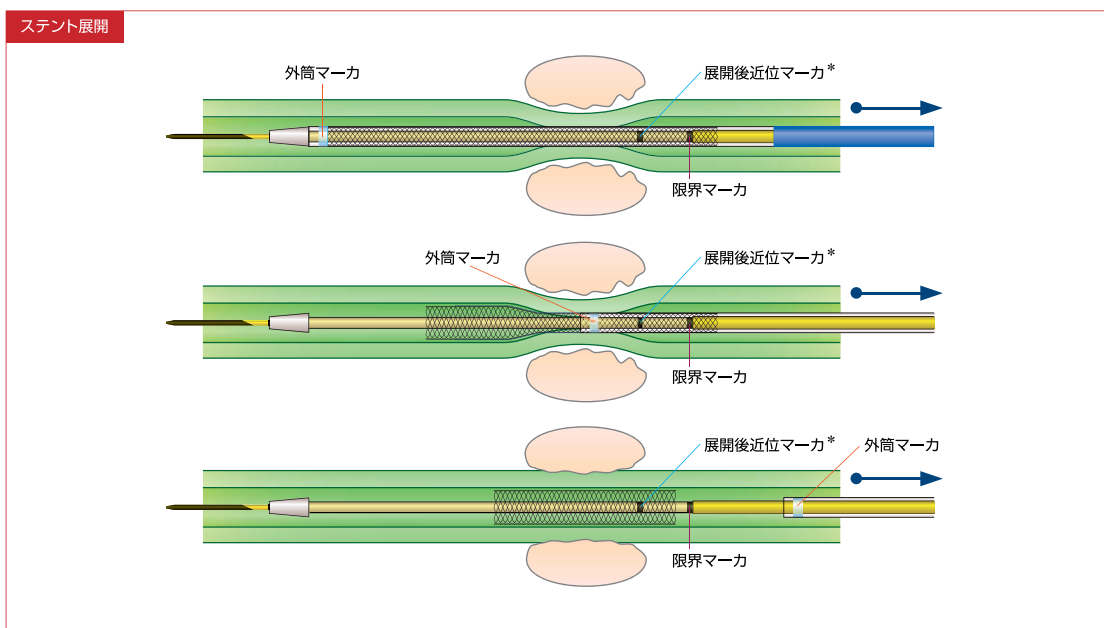

ステントの再収納は2回まで可能です。外筒マーカが限界マーカを超えるとステントの再収納は行えません。

ウォールフレックス 十二指腸用ステント

カタログ番号	ステント			デリバリーシステム			適合ガイドワイヤ (inches)
	外径 (mm) フレア部	本体	ステント長 (cm)	カテーテル外径 (Fr)	全長 (cm)	有効長 (cm)	
6501	27	22	6	10	270	230	Max. 0.035
6502	27	22	9	10	270	230	Max. 0.035
6503	27	22	12	10	270	230	Max. 0.035

推奨ガイドワイヤ

■ Hydra Jagwire™ (スティップ) 0.035 インチ, 450cm

カタログ番号: 5606 ストレートチップ

カタログ番号: 5607 アングルチップ

■ Jagwire™ Plus (スティップ) 0.035 インチ, 450cm

カタログ番号: 5660 ストレートチップ

カタログ番号: 5661 アングルチップ

医科診療報酬点数: K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 9,210 点

特定保険医療材料区分: 157 消化管用ステントセット (1) カバーなし

償還価格: 256,000 円

※径表示換算目安: 1mm=3French=0.0394inches

販売名: ウォールフレックス 十二指腸用ステント
医療機器承認番号: 22100BZX01033000

販売名: ハイドラ ジャグワイヤー
医療機器承認番号: 220ABBZX00040000

販売名: ジャグワイヤー
医療機器承認番号: 220ABBZX00192000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。

© 2014 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

WallFlex™, Open to the Possibilities™, Hydra Jagwire™, Jagwire™ は Boston Scientific Corporation のトレードマークです。

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1412-31506-5 / PSST20141126-0849