

# LATITUDE™ NXT Comunicador Guía de Referencia Rápida

## Modelos 6498, 6280 and 6290



( Para cualquier otro modelo de monitor, llame a Servicio al Paciente durante horas de oficina)




Esta guía está diseñada para ayudar con la solución de problemas básicos, luces y preguntas comunes para el Comunicador LATITUDE NXT. Si necesita ayuda adicional, consulte la información adicional abajo, llame a Servicio al paciente durante horas de oficina (M-F 8am-5pm CST), o comuníquese con su proveedor de atención médica. Para obtener ayuda con la configuración, consulte el manual del Communicator LATITUDE o la Guía de inicio rápido disponible en el sitio Web de Boston Scientific.







**NOTA:** El sistema LATITUDE no está diseñado para ayudar con emergencias de salud. Si el paciente no se siente bien o necesita atención médica urgente, llame a un proveedor de atención médica o marque el 911. El monitor LATITUDE no brinda monitoreo continuo y no afecta el funcionamiento del dispositivo implantado del paciente.




### Recursos adicionales de LATITUDE:

Aplicación para pacientes **MyLATITUDE™**: Descárguela en App Store (para iOS) o Google Play Store (para Android) - Busque "MyLATITUDE".

Sitio Web Boston Scientific: [www.bostonscientific.com/patients](http://www.bostonscientific.com/patients)

Escenarios/Luces	Guía	
<p>Luz roja Llamar al médico (intermitente o fija)</p> 	<p><b>Se detectó un cambio potencial con el dispositivo implantado. El monitor no puede enviar información del dispositivo implantado al sistema LATITUDE. Se requiere su respuesta inmediata. Llame a su proveedor de atención médica.</b></p> <p><b>Para intentar resolverlo, siga los pasos a continuación:</b></p>	
	<p>1. Desconecte el cable de corriente, espere un minuto y vuélvalo a conectar al monitor. Podría reaparecer el Icono de Llamar al Doctor de color rojo.</p>	
	<p>2. Si usa adaptadores Ethernet o celulares proporcionados por Boston Scientific, espere hasta que se vea una luz en el adaptador, luego presione brevemente y suelte el botón del corazón.</p>	
	<p>3. Los datos se han enviado cuando aparecen una figura azul y ondas verdes fijas a ambos lados del corazón. Informe al proveedor de atención médica del paciente sobre posibles cambios con el dispositivo implantado.</p>	
<p>4. Si los resultados difieren de lo antes descrito, consulte las secciones de solución de problemas de Ondas colectivas amarillas u Ondas de envío amarillas a continuación y llame al proveedor de atención médica del paciente si no se comunicó previamente antes de la solución de problemas.</p>		

Escenarios/Luces	Guía	
<p><b>Luz Amarilla llamar al médico.</b></p>  <p><b>(Intermitente ó fija)</b></p>	<p><b>Su Comunicador no puede monitorear el dispositivo implantado actualmente. o la monitorización de su dispositivo implantado fue suspendido del sistema LATTITUDE.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desenchufe el Comunicador del tomacorriente de ambos lados, espere 1 minuto. Después de un minuto vuelva a enchufarlo. El Icono amarillo llamar al médico podría reaparecer.</li> <li>Localice el botón blanco de estado atrás del monitor (cerca de los cables). Mantenga presionado el botón de estado de la parte posterior del Comunicador hasta que las ondas de envío parpadeen en color verde al lado derecho del corazón. Si las luces no cambian, el monitor tendría que ser remplazado. Por favor llame a Servicio al paciente durante horas de oficina.</li> <li>Si las ondas al lado derecho del corazón están verde sólido y el Icono del Dr. está en azul. La luz amarilla llamar al médico debería apagarse. Si el resultado es diferente a lo descrito, vea solución de problemas ondas amarillas de envío o llame a Servicios al Paciente durante horas de oficina.</li> </ol>	 
<p><b>Enviar una lectura O el Botón del Corazón está Parpadeando</b></p> 	<p><b>El botón del corazón parpadea porque el Comunicador necesita ayuda para completar una verificación del dispositivo previamente programada.</b> <b>NOTA: Esto no indica un problema con el dispositivo implantado.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente. Presione y suelte brevemente el botón del corazón. Manténgase frente al monitor mientras se completa la interrogación.</li> <li>Los datos se han enviado cuando aparecen una figura azul y ondas verdes fijas a ambos lados del corazón.</li> <li>Si los resultados difieren de lo descrito, consulte las secciones de solución de problemas de Ondas colectoras amarillas u Ondas de envío amarillas a continuación o llame a Servicios al paciente durante horas de oficina.</li> </ol>	 

<p><b>Ondas Amarillas Colectivas (no se puede obtener los datos del dispositivo implantado)</b></p>		
 <p>Consulte la sección "Donde colorar el Comunicador" en el manual del paciente del Comunicador LATTITUDE</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mueva cualquier producto electrónico inalámbrico al menos un metro (3 pies) del monitor (ejemplo, teléfonos inalámbricos o celulares, monitores para bebés otros equipos médicos, iPads/tabletas, enrutadores de computadora)</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Presione y suelte brevemente el botón del corazón, manténgase al alcance del monitor mientras se completa la interrogación.</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Los datos se han enviado cuando aparece una figura azul y ondas verdes fijas a ambos lados del corazón.</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Si los resultados difieren de los descritos, llame a Servicios al paciente durante horas de oficina.</li> </ol>		

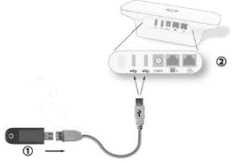
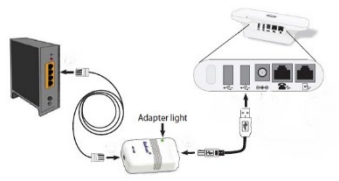
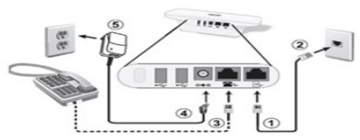


**Ondas de Envío Amarillas (no se puede mandar datos al sistema LATITUDE)**



Consulte la sección "Dónde colocar el Comunicador" en el Manual del paciente del comunicador LATITUDE.

Los monitores de casa están diseñados para funcionar con línea telefónica o los adaptadores proporcionados por Boston Scientific, adaptador celular, adaptador Ethernet.

**Nota:** Solo utilizar Un método de conexión a la vez.

ADAPTADOR CELULAR	ADAPTADOR ETHERNET	LINEA TELEFONICA
<p>1. Asegúrese de que el cable de extensión USB negro este bien conectado a la parte posterior del monitor y con el adaptador USB. <b>*La luz del adaptador puede parpadear, permanecer fija, cambiar de color o apagarse brevemente. Esta es una función normal.</b></p> 	<p>1. Asegúrese de que un extremo del cable del adaptador ethernet provisto se conecte de forma segura al puerto USB en la parte posterior del monitor. Conecte el otro extremo del cable del adaptador ethernet al puerto ethernet/LAN activo en el enrutador WIFI. (El adaptador se encenderá)</p> 	<p>1. Verifique que el cable telefónico este bien conectado atrás del monitor en el puerto extremo derecho. Conecte el otro extremo del cable telefónico a una conexión de pared activa ó al modem dependiendo de su servicio telefónico. Verifique un tono de marcado fijo en la toma de pared del teléfono y todos los teléfonos estén colgados.</p> 
<p>2. Para todos los métodos de conexión, todos los interruptores en la parte inferior del monitor deben colocarse cerca de los números.</p> <p><b>Nota:</b> Usuarios de la línea telefónica que requieren marcar un número prefijo, o los usuarios de líneas fijas que viajan fuera de U.S. consulten el manual  del Comunicador LATITUDE para conocer la configuración de los interruptores.</p>		
<p>3. Desenchufe el tomacorriente durante un minuto, y luego reconéctelo al monitor. Localice el botón de estado blanco pequeño en la parte posterior del monitor (cerca de los cables).</p> <p>Mantenga presionado hasta que aparezca luces verdes intermitentes a la derecha del corazón.</p> <p>Los datos fueron enviados cuando aparecen una figura azul y ondas verdes sólidas a la derecha del corazón.</p> 		
<p>4. Si no tiene éxito, mueva el monitor a una nueva ubicación y repita los pasos anteriores. Si aún no tiene éxito, llame a Servicios al Paciente durante las horas de oficina.</p>		

## Preguntas y Respuestas Comunes

<p><b>Síntomas relacionados con el dispositivo de implante;</b> descargas; duración de la batería; controlar la programación, los datos o los informes</p>	<p>Informe a su proveedor de atención médica. Boston Scientific no tiene acceso a la información médica.</p>
<p><b>Preguntas sobre viajes como:</b> ¿Deben los pacientes llevar su monitor mientras viajan? quién debe ser informado; seguridad de aeropuerto.</p>	<p>Informe a su proveedor de atención médica, ellos le brindarán orientación si es necesario llevar el monitor. Todo el equipo del monitor es seguro para rayos X, se guarda en el equipaje de mano y se asegura de que se utiliza el método de conexión correcto para viajar (ejemplo: adaptador de celular). <b>El dispositivo implantado está diseñado para funcionar normalmente sin el uso del monitor.</b></p>
<p><b>¿Qué sucede si se corta la energía/se desconecta el monitor?</b></p>	<p>Los datos se almacenan en la memoria del monitor. Cuando se restablezca la energía o vuelva a enchufar el cable de corriente, el monitor volverá al funcionamiento normal. El monitor parpadeará brevemente en amarillo y luego la luz de LATITUDE volverá a verde. Si una luz verde de LATITUDE no se enciende, llame a Servicios al Paciente durante horas de oficina.</p>
<p><b>¿Cómo me aseguro de que el monitor esté funcionando?</b></p>	<p>Presione y suelte el botón de estado blanco en la parte de atrás del monitor (cerca de los cables) durante un segundo. Si las luces son verdes en ambos lados del corazón, el monitor funciona correctamente. Si aparecen luces amarillas, consulte las secciones anteriores de solución de problemas de Ondas colectoras amarillas u ondas de envío amarillas.</p>
<p><b>¿Qué significa la luz indicadora amarilla intermitente de LATITUDE?</b></p>	<p>La luz indicadora de LATITUDE parpadea brevemente en amarillo durante el proceso de inicio y parpadea en amarillo durante más tiempo durante una actualización de software. La luz indicadora de LATITUDE se vuelve verde después de que se completa el proceso de inicio o la actualización del software.</p>

## LATITUDE™ NXT Sistema de Gestión de Pacientes.

### USO PREVISTO

El Sistema de gestión de pacientes LATITUDE™ NXT está diseñado para comunicarse de forma remota con un generador de impulsos compatible de Boston Scientific CRM y transferir datos a una base de datos central. El Sistema LATITUDE NXT proporciona datos del paciente que se pueden utilizar como parte de la evaluación clínica del paciente.

### CONTRAINDICACIONES

Las alertas pueden LATITUDE NXT está contraindicado para su uso con cualquier dispositivo implantado que no sea un dispositivo implantado compatible de Boston Scientific. No todos los dispositivos implantados de Boston Scientific son compatibles con el Sistema LATITUDE NXT. Para conocer las contraindicaciones de uso relacionadas con el dispositivo implantado, consulte la guía del Sistema del dispositivo implantado de Boston Scientific que se está interrogando.

### PRECAUCIONES

Las Alertas pueden aparecer en el sitio web de LATITUDE NXT a diario. La notificación principal de las condiciones de alerta se realiza a través de la página ver lista de pacientes en el sitio web de LATITUDE NXT. El médico debe iniciar sesión en el sitio web de LATITUDE NXT para recibir alertas. Aunque la notificación secundaria a través de correo electrónico y SMS los mensajes de texto están disponibles, estos recordatorios dependen de sistemas externos y pueden demorarse o no ocurrir. La función de notificación secundaria no elimina ni reduce la necesidad de consultar el sitio web. Los datos y las alertas del dispositivo implantado suelen estar disponibles para su revisión en el sitio web de LATITUDE NXT dentro de 15 minutos posteriores a una interrogación exitosa. Sin embargo, las cargas de datos pueden demorar mucho más (hasta 14 días). Si el Comunicador no puede interrogar al dispositivo implantado o si el Comunicador no puede comunicarse con el servidor LATITUDE NXT para cargar datos, pueden transcurrir hasta 14 días antes de que el servidor LATITUDE NXT detecte estas condiciones e informe al usuario de la clínica que no se está monitoreando. Si ambas condiciones ocurren al mismo tiempo, esta notificación podría demorar hasta 28 días. Los datos del dispositivo implantado y la notificación de alerta pueden retrasarse o no ocurrir en absoluto bajo varias condiciones, que incluyen, entre otras, las siguientes: Limitaciones del Sistema; el Comunicador está desenchufado; el Comunicador no puede conectarse al servidor LATITUDE NXT a través del Sistema telefónico configurado; el dispositivo implantado y el Comunicador no pueden establecer y completar una sesión de telemetría; el Comunicador está dañado o funciona mal; el paciente no cumple con el uso prescrito o no está usando el Sistema LATITUDE NXT como se describe en el manual del paciente; si está suscrito al plan de datos móviles de LATITUDE, la falta de dos o más pagos interrumpe la suscripción; el usuario de la clínica puede identificar a cualquier paciente que no esté siendo monitoreado como se describe anteriormente usando el filtro No monitoreado en ver lista de pacientes.

### EFECTOS ADVERSOS:

Ninguno conocido.

### LIMITACIONES DEL SISTEMA:

El Sistema LATITUDE NXT no proporciona supervisión continua en tiempo real. Como Sistema de monitorización remota, el Sistema LATITUDE NXT proporciona una monitorización periódica de la paciente basada en los ajustes configurados por el médico. Hay muchos factores internos y externos que pueden dificultar, retrasar o impedir la adquisición y la entrega del dispositivo implantado, el sensor y la información del paciente según lo previsto por el médico. Estos factores incluyen: reloj del dispositivo; entorno del paciente; servicio de datos celulares; Sistema telefónico; capacidad de memoria del comunicador; entorno clínico; cambios de horario/configuración; o procesamiento de datos.

**PRECAUCION:** La ley federal (USA) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de este. Solo con receta. Antes de usar, consulte las "instrucciones de uso" completas para obtener más información sobre indicaciones, advertencias, precauciones, eventos adversos e instrucciones del operador. (Rev A) 92436260



**Rhythm Management**  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752-1234  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

*Medical Professionals:*  
**1.800.CARDIAC (227.3422)**  
*Patients and Families:*  
**1.866.484.3268**