




| **Permanecer conectado**



La aplicación para pacientes myLUX™\* transmite los datos del ritmo cardíaco almacenados en su dispositivo\*\* de monitor cardíaco insertable (Insertable Cardiac Monitor, ICM) LUX-Dx™ a la clínica. Es muy importante mantener su aplicación conectada para que su proveedor de atención médica pueda monitorear su ritmo cardíaco de forma remota. **Asegúrese de seguir siempre las prácticas recomendadas que se detallan a continuación.**


\*La aplicación descargable para pacientes myLUX solo está disponible para los dispositivos ICM LUX-Dx II y LUX-Dx II+. No está disponible para los dispositivos ICM LUX-Dx.

\*\*Toda referencia a "ICM LUX-Dx" incluye a los sistemas ICM LUX-Dx™, LUX-Dx II™ y LUX-Dx II+™.

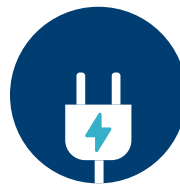

1

Mantenga su teléfono inteligente cargado, encendido y conectado a Internet a través de una red de telefonía móvil o wifi.

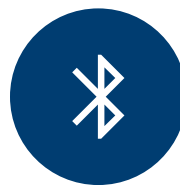

2

Mantenga Bluetooth® activado para que la aplicación pueda conectarse a su dispositivo ICM.



3

Mantenga su teléfono inteligente a una distancia menor de 6 pies (2 metros) de usted mientras duerme por la noche.


4

Si ve una pantalla roja y el ícono de signo de exclamación, esto significa que su aplicación no está conectada. Toque **Comprobar la conexión**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


Cuando la aplicación vuelva a conectarse, aparecerá una pantalla verde. Toque **Salir**.



iPhone

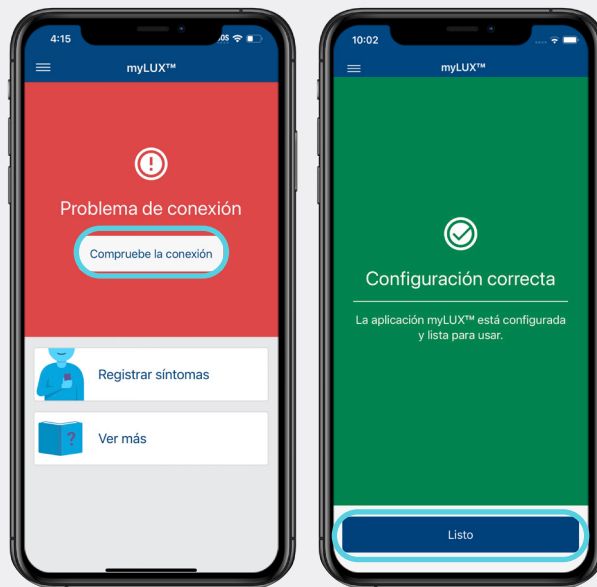

Android

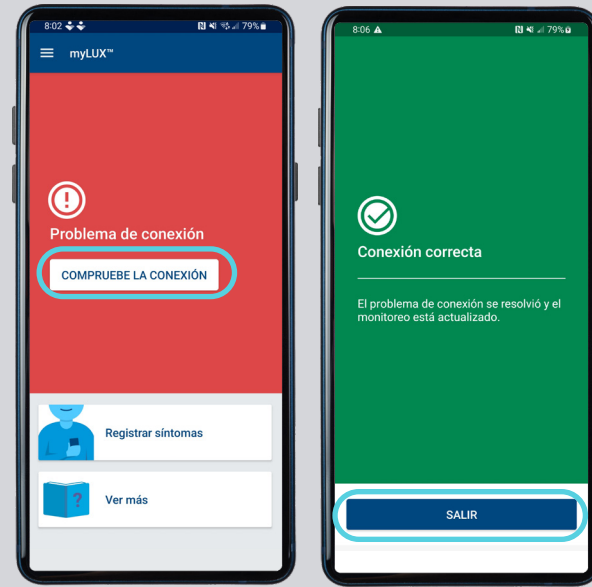

Dependiendo del modelo de teléfono específico o de la versión del sistema operativo, algunas imágenes de las pantallas de los teléfonos pueden verse diferentes a la pantalla del dispositivo móvil que usted tiene.




5

Abra su aplicación myLUX™ de vez en cuando. Busque siempre una pantalla azul y un ícono de marca de verificación después de abrir la aplicación. Esto confirma que el monitoreo está actualizado. No es necesario que realice ninguna otra acción.

iPhone



Android

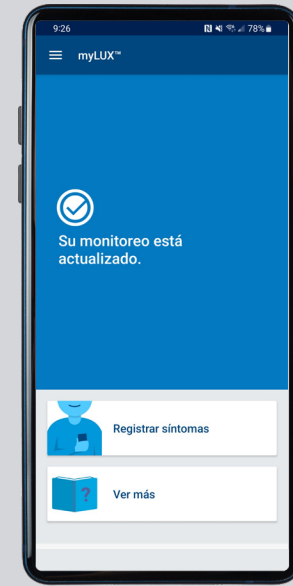


Dependiendo del modelo de teléfono específico o de la versión del sistema operativo, algunas imágenes de las pantallas de los teléfonos pueden verse diferentes a la pantalla del dispositivo móvil que usted tiene.



6

Si usa su propio teléfono inteligente, recuerde los siguientes puntos, son muy importantes:

- **No salga de la aplicación** (es decir, no deslice el dedo hacia arriba para cerrarla) ni **la desinstale**.
- **Si reinicia su teléfono inteligente**, asegúrese de tocar el ícono de la aplicación para **volver a abrirla**.

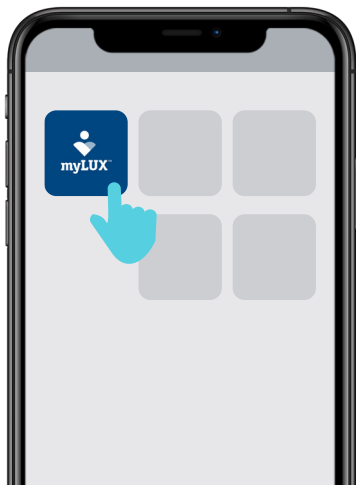


- Mantenga las notificaciones de su aplicación myLUX™ activadas.


Apple




Android

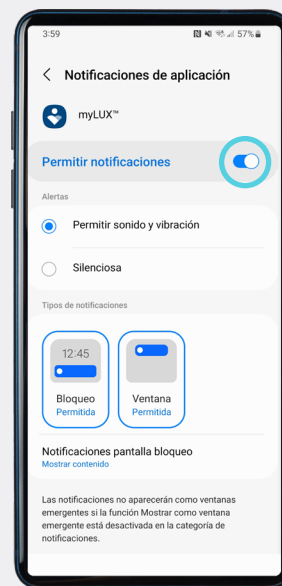

- Mantenga las funciones de actualización en segundo plano y de uso de datos en segundo plano activadas.

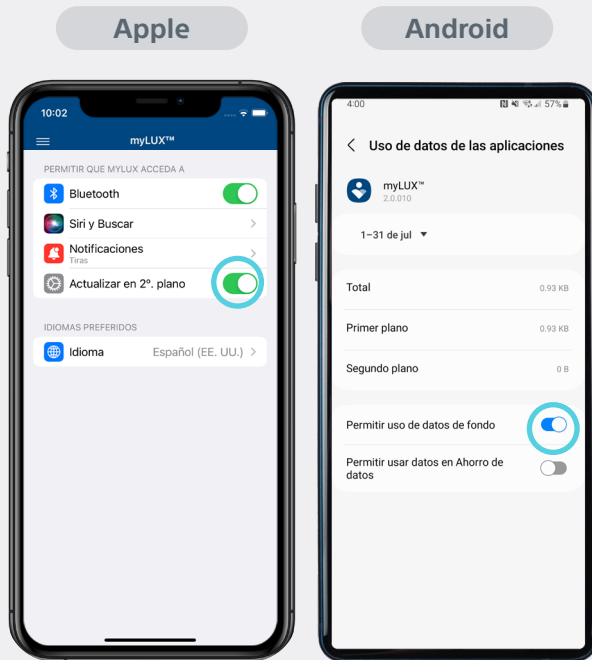

- Deshabilite las funciones que reducen la capacidad de la aplicación para realizar comprobaciones del dispositivo en segundo plano (por ejemplo, el ahorro de energía, el bajo consumo de energía, la optimización de la batería, etc.).

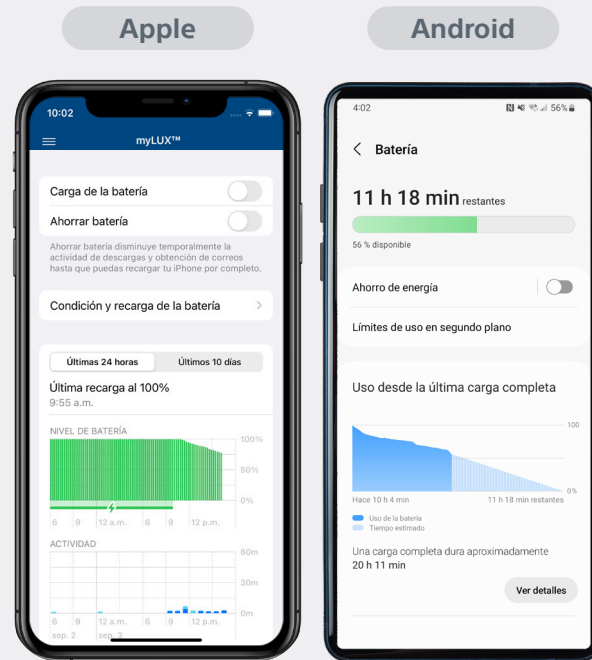

Para obtener más información sobre la aplicación myLUX™, escanee este código QR para visitar el sitio web para pacientes de myLUX™.

# ¿Necesita ayuda?

Llame a Servicios al paciente de RhythmCARE™ de Boston Scientific al **1-866-484-3268**, de lunes a viernes durante el horario de atención y seleccione la opción para ICM LUX-Dx™.

Si necesita atención médica inmediata, llame a su proveedor de atención médica o busque servicios médicos de emergencia.

## Información importante acerca de la aplicación para pacientes myLUX™ y el sistema de monitor cardíaco insertable

El sistema ICM consta de lo siguiente: un monitor cardíaco insertable ("dispositivo ICM"); un imán; y la aplicación para pacientes myLUX ("aplicación"). La aplicación para pacientes myLUX™ se utiliza con un sistema de monitor cardíaco insertable (ICM) de Boston Scientific (BSC), que es un dispositivo pequeño diseñado para monitorear y registrar su ritmo cardíaco una vez que este se coloca debajo de la piel. Esta información se comparte a través de una transmisión automática a la clínica y a su médico para una evaluación médica. El ICM y la aplicación no están pensados para brindar asistencia en caso de emergencias médicas, lo que significa que no proporcionan ningún tratamiento para los posibles ritmos que puedan registrarse. La aplicación para pacientes myLUX™ está diseñada para funcionar solo con el ICM que su médico le recetó e implantó.

El sistema ICM no trata las arritmias cardíacas (latidos cardíacos anormales que son demasiado rápidos, demasiado lentos o irregulares), sino que recopila información para que su proveedor de atención médica la use como respaldo de la evaluación médica de sus síntomas o su afección. El monitoreo del corazón que se realiza con el dispositivo ICM no causará sensaciones notorias. Su sistema ICM se configuró para recopilar de forma automática los datos almacenados en su dispositivo ICM y enviarlos a la clínica para que allí los revisen de acuerdo con el cronograma que haya establecido su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica también puede pedirle que transmita los datos de forma manual; si esto sucede, se le proporcionarán instrucciones adicionales ya que este tipo de transmisión solo debe hacerse en limitadas ocasiones.

Los campos electromagnéticos son creados por dispositivos que utilizan electricidad, incluidos los que están enchufados a un tomacorriente o que funcionan con baterías. Los dispositivos que emiten fuertes campos electromagnéticos pueden tener el potencial de interferir temporalmente con la capacidad de su dispositivo ICM para detectar y monitorear su ritmo cardíaco. También podrían retrasar o prolongar la comunicación entre su dispositivo ICM y la aplicación para pacientes myLUX™.

El imán provisto con el sistema ICM puede causar interferencia con dispositivos sensibles a campos magnéticos como audífonos, marcapasos y otros dispositivos implantados. También puede desactivar de manera permanente algunas tarjetas de banda magnética.

Plantee al personal médico sus dudas sobre los riesgos de utilizar la aplicación myLUX™, el imán o su dispositivo ICM.

Consulte el Libro del paciente para conocer todas las advertencias, las precauciones y la información de seguridad importante.  
*Solo Rx*

92505919 (Rev. B)

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

### Cardiología

300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752-1234  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

Profesionales médicos:  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
Pacientes y familiares:  
1.866.484.3268

© 2023 Boston Scientific Corporation  
or its affiliates. All rights reserved.  
CRM-1640507-AA