



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### Comunicador LATITUDE™




Lea esta información antes de realizar la instalación.

## Información útil acerca del Comunicador LATITUDE

### ¿Para qué se usa?

El Comunicador LATITUDE está diseñado para recolectar información de un dispositivo implantado. El Comunicador envía esta información al sitio web para médicos para que su equipo de atención médica pueda visualizarla y lo ayuda en el seguimiento del cuidado que usted está recibiendo.

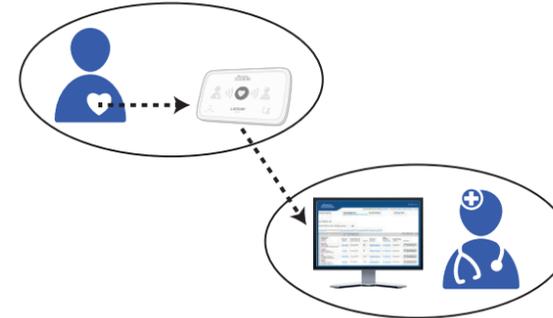

**PRECAUCIÓN:** El Comunicador LATITUDE **no** es un sistema médico de emergencia.

### ¿Cómo funciona?

Una vez configurado (**consulte los pasos de configuración en el dorso**), el Comunicador comprobará periódicamente el dispositivo de acuerdo con un programa establecido por su médico. En ocasiones, esto se producirá de forma automática y, otras veces, puede que el Comunicador necesite su ayuda. Cuando necesite su ayuda, el botón Corazón parpadeará. Solo debe pulsar el botón Corazón intermitente para completar la comprobación del dispositivo.



### ¿Dónde debe colocarse el Comunicador?

- Cerca de donde duerme o junto a la cama, a una distancia máxima de 3 metros (10 pies). Si esto no es posible, coloque el Comunicador en un lugar donde pase una cantidad importante de tiempo cada día.
- Deberá estar a una distancia mínima de 1 metro (3 pies) de televisores, reproductores de DVD, computadoras, módems, enrutadores y otros equipos electrónicos.
- Donde pueda sentarse cómodamente y ver la parte delantera del Comunicador.
- En función del método de conexión utilizado:
  - **Móvil:** En una ubicación donde pueda recibir una señal buena de celular.
  - **Internet:** Cerca pero a una distancia máxima de 1 metro (3 pies) de su módem o enrutador de Internet.


### ¿Qué significan estos indicadores?

Si ve...	Significa que...	Haga esto...
Botón Corazón intermitente	El Comunicador necesita ayuda para completar una comprobación del dispositivo programada. <b>Nota:</b> Esto no indica un problema con el dispositivo implantado.	Pulse el botón Corazón. Manténgase cerca del Comunicador hasta que todas las luces estén como se muestra en la próxima fila.
Los datos del dispositivo implantado se han enviado al sitio web para médicos.	Los datos del dispositivo implantado se han enviado al sitio web para médicos.	No es necesaria ninguna acción.
Existe un posible problema que debe abordar un médico.	Existe un posible problema que debe abordar un médico.	Llame a su médico.
Si observa ondas o el icono Llamar al médico encendido en color amarillo, significa que el Comunicador tiene un problema con la conexión o que se suspendió el monitoreo.	Si observa ondas o el icono Llamar al médico encendido en color amarillo, significa que el Comunicador tiene un problema con la conexión o que se suspendió el monitoreo.	Consulte el error correspondiente en la sección Solución de problemas, del Manual del paciente.

Consulte los pasos de configuración en el dorso.



**1** Conecte la fuente de alimentación.

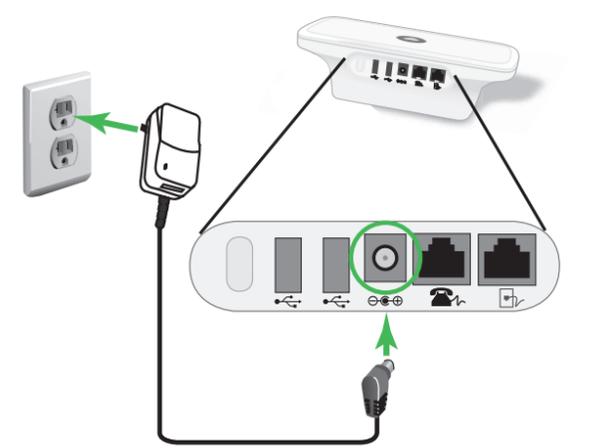


**2** Identifique el método de conexión **único** que usará para conectarse al sitio web para médicos:

- A. Teléfono móvil
- B. Internet


Luego, conecte los cables para ese método **único** como se muestra en el paso 3.

**3** Conecte los cables para su método de conexión **único** (A o B).

A. Conexión por móvil, con un adaptador USB para móviles

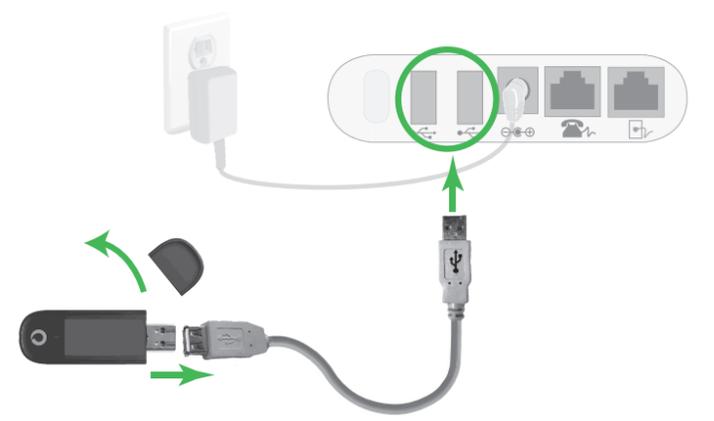

B. Conexión a Internet, con el adaptador USB para Ethernet

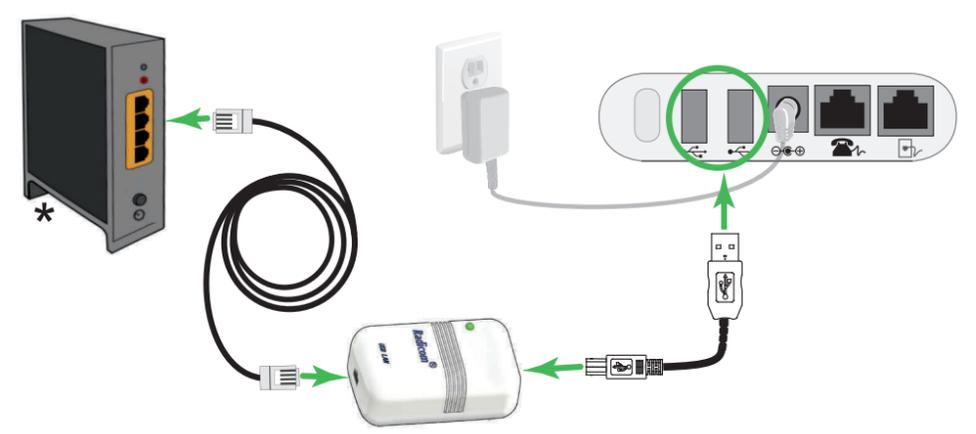

\* Módem o enrutador de Internet

Siempre mantenga su método de conexión enchufado al Comunicador.

Esto permite que el Comunicador envíe los datos recolectados de su dispositivo implantado al sitio web para médicos para que su equipo de atención médica pueda visualizarlos.

Consulte el Manual del paciente para obtener más detalles.

Si está usando un método de conexión diferente de los dos que se muestran, como una conexión telefónica estándar, consulte el Manual del paciente para obtener las instrucciones de instalación.

**4** Pulse el botón Corazón intermitente del Comunicador LATITUDE para comenzar el proceso de instalación.




**5** Espere mientras se envían los datos. Esto puede demorar unos minutos.

Recopilación de datos del dispositivo implantado

Envío de datos

Si el indicador LATITUDE parpadea en color amarillo, vea el paso 6. Si los indicadores están encendidos como se muestra en el paso 7, omita el paso 6.

**6** Espere la actualización del software.

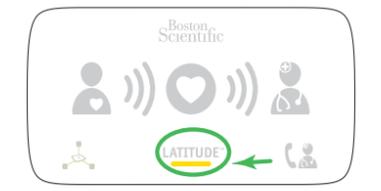

El software se puede estar actualizando. Espere unos cuantos minutos a que parpadee el botón Corazón y púlselo de nuevo. Esto puede ocurrir varias veces. Pulse el botón Corazón cada vez que parpadee.

**7** ¡Listo!



Si los indicadores están encendidos como se muestra arriba, la configuración habrá finalizado. Las luces se apagarán automáticamente después de 2 minutos.

**8** Siempre mantenga el Comunicador enchufado.



Esto permitirá que el Comunicador compruebe el dispositivo implantado según haya planificado el personal médico.

? ¿Necesita más ayuda?

Si observa ondas o el icono Llamar al médico encendido de color amarillo (como se muestra al dorso de esta guía), consulte el error correspondiente en la sección Solución de problemas, del Manual del paciente.

Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el personal médico o con el servicio de atención al paciente llamando al 1-866-484-3268.

Consulte la información útil en el dorso.